

ENVÍO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS RESPIRATORIAS

Todas las muestras de origen respiratorio (hisopados de fauces, hisopados nasales, hisopados de vigilancia, BAL, esputo, aspirado nasofaríngeo) que sean derivadas deben ser enviadas en triple envase:

- a) Utilizar doble guante colocar el tubo primario conteniendo el material biológico, rotulado con nombre y apellido del paciente y fecha de toma de muestra, en un contenedor secundario con cierre hermético (puede ser una bolsa con cierre tipo “zip loc” o bien frasco de tiras de orina).
 - b) Quitar el par de guantes externos y rociar con etanol 70% el contenedor secundario.
 - c) Colocar en un tercer recipiente rígido con rótulo, que identifique al laboratorio derivante y con la leyenda “MUESTRAS RESPIRATORIAS”. Rociar este último recipiente con etanol 70% por su superficie exterior y enviarlo.
 - d) Cualquier información en papel (RP, ficha de derivación, etc.), debe colocarse por fuera del tercer recipiente, dentro de una bolsa, pegado con cinta, para evitar su extravío.
- Enviar las muestras refrigeradas dentro de las **24 horas de su toma**.
 - Todas las muestras que no sean respiratorias, deben ser enviadas en otro recipiente, separado del anterior.

Desde ya muchas gracias por su colaboración y quedamos a disposición por cualquier duda o consulta que surgiera.

